



Caracteristici speciale

- Manipulare facilă și sigură cu ajutorul unui singur buton de reglare
- Control modern cu afișaj clar de text
- Comutatoare de siguranță și limitare a curentului electric pentru evitarea șocurilor electrice
- Electrozi din plăci de aluminiu extinse pentru o densitate omogenă a curentului și pentru a evita reacțiile alergice
- Alimentare de la rețeaua principală, deoarece funcționarea pe bază de baterii ar fi mult mai costisitoare.
- Valiză solidă, care servește și ca bazine pentru tratamentul mâinilor și picioarelor.

idromed® 5 GS/PS

Instrumentele eficiente de iontoforeză pentru tratamentul hiperhidrozei

Curent direct (GS) sau curent direct pulsatil (PS)

Tratamentul prin iontoforeză folosind curent direct sau curent direct pulsatil este o metodă terapeutică recunoscută la nivel internațional și științific consacrată, folosită de mai mulți ani.

În cadrul studiilor științifice tratamentul ce utilizează curentul direct pulsatil cu aparatul idromed® 5 PS este considerată metoda terapeutică optimă, datorită noului tip de curent, mai ales în cazul pacienților foarte sensibili, a copiilor și a tinerilor. Curentul folosit în tratament este aproape imperceptibil.

Eventualele efecte adverse sunt deci mult reduse. Mâinile și picioarele pot fi scoase din bazine în timpul tratamentului, fără a se produce obișnuitul "efect de barieră electrică" (șoc electric).



Electrozi-burete opționali pentru axile Articol numărul idromed® 5 GS: 100 000



Articol numărul 995100
Articol numărul idromed® 5 PS: 110 000

Date tehnice

Dimensiuni (Lungime x Lățime x Înălțime):
290 x 390 x 110 mm

Dimensiunile unității

(Lungime x Lățime x Înălțime): 210 x 120 x
70 mm

Greutate totală: aproximativ 2,5 kg (unitate,
valiză și accesorii)

Sursă de alimentare: 230V / 50Hz / 20VA

Poate face obiectul unor modificări de ordin
tehnic.