


Ghid de pornire rapidă HEINE® iC1

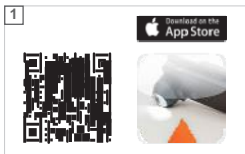

Descărcați aplicația HEINE iC1 din AppStore.



Așezați iPhone*-ul în husa adecvată și fixați-l. Asigurați-vă să fie camera în poziția corectă.




Atașați husa telefonului mobil de HEINE iC1 până se fixează.



Porniți dispozitivul.



Dispozitivul pornește automat în modul de polarizare. Funcția de comutare vă permite să alternați între imagini polarizate și imersate.

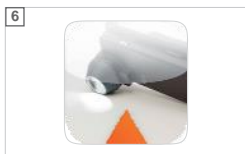

Porniți aplicația HEINE iC1 pe iPhone*-ul dvs.



Apăsați cu degetul mare prin deschizătura din husă pentru a deconecta iPhone*-ul.



Încărcarea HEINE iC1 cu cablul USB furnizat.

Curățarea și dezinfectarea



Vă rugăm să aveți în vedere următoarele: pentru a preveni deteriorarea dispozitivului, nu pulverizați dezinfectante sau detergenți direct pe plăcuța de contact.