

Sonde de contact: miniaturale, placate cu aur. Pentru leziuni minuscule până la mici - de ex., negi plăți mici, leziuni în zona ochiului sau pe pleoapă.



Vârf ascuțit



1 mm



2 mm



3 mm

Sonde de contact: medii, placate cu aur. Pentru leziuni mici până la medii - de ex., negi plăți, mici tumori benigne, leziuni în zona ochiului.



4 mm



5 mm



6 mm



8 mm


Sonde de contact: mari, placate cu aur. Pentru leziuni medii până la mari - de ex., negi plăți, tumori benigne.



10 mm



15 mm

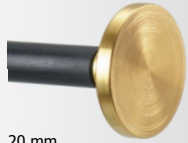

20 mm



30 mm

Vârfuri standard pentru pulverizator: A - pulverizare intensă pentru leziuni mari și descumare superficială, B & C - debit mediu pentru aplicații generale, D - pulverizare fină pentru leziuni mici.



deschidere de tip A (Ø 1,0)



deschidere de tip B (Ø 0,75)



deschidere de tip C (Ø 0,55)



deschidere de tip D (Ø 0,45)


Vârfuri speciale pentru pulverizator:



Extensie pulverizare curbată



Extensie pulverizare dreaptă

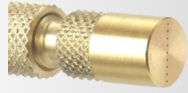

Vârf descumare cu jupuire ușoară Adaptor Luer lock



Accesorii și adaptoare speciale:



Limitator de debit deschis



Adaptor pulverizator cu vârf de curățare



Conuri din policarbonat (Lexan)



Conuri din neopren

Selectați o deschidere a pulverizatorului adecvată tipului de leziune care urmează să fie tratată. Înghețarea în profunzime este cel mai bine obținută când deschiderea pulverizatorului este apropiată de leziune (la o distanță de 5-10 mm). Descumarea superficială se obține utilizând vârful de pulverizare fină la o distanță de aprox. 5 cm.

Sondele de contact închise oferă înghețare în profunzime cu o răspândire laterală minimală. Selectați o sondă corespunzătoare măririi leziunii și udati pielea cu o picătură de apă înainte de aplicarea sondei.


Sonde cervicale: pentru tratarea eroziunilor cervicale. Lungime de 160 mm, vârf teflonat pentru o detașare ușoară.



19 x 5 mm proeminență  
25 x 5 mm proeminență



19 x 15 mm proeminență

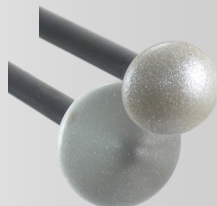

19 mm în formă de dom  
25 mm în formă de dom



Tub retragere universal



Geantă de transport CryoPro®



Bază universală pe roți



Mănuși și ochelari de protecție



Filtre tub retragere  
Garnituri pentru unitatea de tratare



O gamă variată de containere de depozitare de la furnizori de elită

## CORTEX TECHNOLOGY