

EIP 2

Pompa de irigație Erbe EIP 2 - pentru
vizibilitate clară a țesutului vizat



Siguranță mai mare în intervențiile endoscopice – vizibilitate clară pentru diagnostic și tratament

Prin intermediul pompei de irigație EIP 2, țesutul vizat este curățat de fecale, resturi alimentare, cheaguri sau sânge. EIP 2 poate fi activat pentru irigații în timpul diagnosticului și a tratamentului, astfel încât nu mai este necesar un cateter suplimentar de irigație.



După irigarea peretelui de organe, crește vizibilitatea țesutului vizat și este îmbunătățită aplicarea electrochirurgicală.

Avantajele irigației

În tăierea și coagularea electrochirurgicală, adeziunea este redusă pe țesutul umed, irigat. În plus, irigarea permite, de asemenea, expunerea mai eficientă a surselor de sângerare, permițând coagularea eficientă și vizată.

Erbe EIP 2 este activat, fie prin intermediul comutatorului de picior sau direct la unitate. Butoanele de activare rapidă de pe ecran permit utilizatorului să selecteze între trei niveluri diferite de irigare - 30%, 50% sau 80% precum standard, care pot fi modificate și stocate individual.

Utilizând un adaptor de irigație, setul de tubulatură poate fi conectat direct la canalul instrumentului endoscopului. Ca urmare, irigația poate fi efectuată în timp ce este introdus un instrument, fără schimbarea instrumentului.



Date tehnice

EIP 2

Nr. 10325-000	Tip pompă	Pompă peristaltică rotativă
	Mod de operare	Continuă

Utilizarea pompei

Activare	Reglare prin intermediul comutatorului de picior sau a panoului de comandă a unității
Intervalul fluxului	Ajustare variabilă prin intermediul unității de control a EIP 2. 3 butoane de activare rapidă (valori presetate de 30, 50 și 80%)
Intervalul maxim al fluxului cu set de tubulatură	500 ml/min corespunde cu 100%

Conexiune rețea

Tensiune de alimentare	220–240 V~
Frecvență de alimentare	50 Hz

Clasificare

Clasa de protecție	Clasificare în conformitate cu EN IEC 60601-1: Clasa I, Tip CF
Clasificare produs medical	Clasificare în conformitate cu Directiva UE 93/42/CEE: IIa

Accesorii

Comutator de picior cu o pedală	20325-000
Set de tubulatură pentru pense de irigație	20325-020
Set de tubulatură, pentru endoscoape flexibile cu conexiune Luer Lock	20325-001
Adaptor de irigație pentru Olympus, Fujifilm G5, STORZ	20325-003
Adaptor de irigație pentru Fujifilm	20325-004
Adaptor de irigație pentru PENTAX	20325-005



Erbe Elektromedizin GmbH
Waldhoernlestrasse 17
72072 Tuebingen
Germania

Telefon +49 7071 755-0
Fax +49 7071 755-179
info@erbe-med.com
erbe-med.com