

Către persoanele interesate,

September 19, 2024

Informații pentru clienți despre Criosondele reutilizabile

Prin prezenta scrisoare dorim să vă informăm oficial că criosondele reutilizabile au fost retrase din producția producătorului Erbe Elektromedizin GmbH la sfârșitul anului 2021.

- 20402-032 - Criosondă Pneumo; flexibilă; ϕ 2,4mm; L 900mm pentru ERBECRYO2
- 20402-040 - Criosondă Pneumo; flexibilă; ϕ 1,9mm; L 1150mm pentru ERBECRYO2
- 20402-037 - Criosondă Pneumo; flexibilă; ϕ 1,9mm; L 900mm pentru ERBECRYO2

Noi, în calitate de producător al acestor criosonde, trebuie să vă informăm, conform Notelor de utilizare, asigurării calității și validării produsului, că:


- *Produsul nu trebuie curățat/dezinfectat, sterilizat și reutilizat de mai mult de 100 de ori.*
- *Nu utilizați un produs al cărui element de aplicare este îndoit, strâns sau prezintă deteriorări la suprafață.*
- *Nu folosiți niciodată un produs care nu este etanș sau un produs cu capacitate inadecvată de congelare.*
- *Produsul trebuie testat cel puțin o dată pe an. Contactați Erbe Elektromedizin GmbH sau partenerul local de vânzări pentru efectuarea testului.*

Opriti utilizarea continuă a criosondelor reutilizabile dacă unul dintre punctele de mai sus se aplică criosondelor dumneavoastră reutilizabile. Reprezentantul de vânzări regional vă va prezenta criosondele noastre noi, cu beneficii suplimentare, care pot înlocui vechile dumneavoastră criosonde reutilizabile.

erbe

Erbe Elektromedizin GmbH
Wa/dhornlestraße 17
72072 Tübingen

Michael Reick
Director Business Management

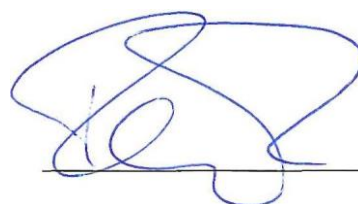

Customer Information